



Il pratico montascale

Superare le scale facilmente e in sicurezza

escalino

www.aat-online.de



Ideen bewegen mehr



Le scale o i singoli gradini possono presentarsi come barriere architettoniche insuperabili. Con il montascale Escalino tali ostacoli non rappresentano più un problema.

L'Escalino è un pratico e maneggevole montascale utilizzabile sia a casa che all'esterno. Grazie ad un innovativo cinematismo di avanzamento che garantisce la massima sicurezza durante l'uso, l'Escalino supera facilmente qualsiasi tipo di scala dritta o a chiocciola. La qualità della vita grazie ad una maggiore mobilità aumenta notevolmente.



Tecnologia avanzata per superare
scale ovunque e in sicurezza

Il brevettato sistema di avanzamento rende l'Escalino particolarmente girevole e sicuro.



Montascale universale — l'Escalino supera scale di tutti i tipi



Il sistema di avanzamento, unico nel suo genere, dell'Escalino ne permette l'utilizzo su scale in legno, pietra, metallo, marmo, PVC e ricoperte con tappeto.

Si possono perfino percorrere scale esterne di emergenza in acciaio. Una coppia di freni di sicurezza blocca in modo automatico l'apparecchio sul bordo di ogni scalino, escludendo la possibilità di uno scivolamento involontario in avanti del montascale sulla scala.

Non è richiesto durante l'utilizzo alcuno sforzo fisico da parte dell'assistente, poiché il peso rimane sempre distribuito in modo ottimale sul montascale garantendo una grande facilità di utilizzo in sicurezza.

L'Escalino è stato progettato per il trasporto di persone che pesano fino a 120 kg. Il pacco batterie garantisce una prolungata autonomia di utilizzo.



Scale a chiocciola o molto pendenti non costituiscono alcun problema.

L'innovativo cinematismo di avanzamento con puntali di appoggio che si posizionano molto vicini allo scalino permette manovre su pianerottoli molto stretti e su scale a chiocciola dove gli spazi sono molto ridotti.

I puntali in gomma danno stabilità al montascale ed evitano di danneggiare gli scalini. Per facilitare la messa in piedi dell'utente o il suo trasferimento basta alzare leggermente in avanti la seduta dell'Escalino aiutandosi elettricamente con i puntali.



Le funzioni e l'indicatore di carica sono particolarmente visibili e intuitivi.



Facile da utilizzare — l'Escalino permette più mobilità nella vita quotidiana



Con poche prese l'Escalino viene piegato e riposto nel bagagliaio dell'autovettura.

L'utilizzo dell'Escalino è estremamente semplice. Durante lo sviluppo di questo montascale si è particolarmente tenuto conto della necessità di realizzare un apparecchio facile da gestire e con dimensioni compatte. Così sono sufficienti un pulsante acceso/spento e uno salita/discesa. L'Escalino è dotato di una chiave magnetica di sicurezza che ne evita l'uso a persone non abilitate; tale chiave ha anche la funzione di „stop“ d'emergenza.

Per maggiore sicurezza un selettore permette di selezionare la modalità che consente di avanzare interrom-

pendo il moto dell'Escalino in automatico su ogni gradino, rendendone l'utilizzo ancora più semplificato e confortevole.

Un ulteriore vantaggio per l'utente sono i braccioli estraibili che facilitano il trasferimento. Invertendo i braccioli tra loro è possibile ridurre la seduta. L'Escalino è pieghevole e può essere riposto in qualsiasi bagagliaio.



L'Escalino soddisfa ogni esigenza con una ampia disponibilità di accessori

Già nella versione base, che comprende la cintura di sicurezza e il carica batterie automatico, l'Escalino è pienamente operativo. Per esigenze specifiche o per maggior comfort è possibile personalizzare l'Escalino con alcuni accessori opzionali.

Accessori per l'Escalino



Invertitore per ricarica in auto



Cintura bacino con bloccaggio



Bretellaggio tronco-bacino

Tutta la nostra esperienza a servizio dell'Escalino

Il nostro obiettivo è migliorare l'autonomia e l'indipendenza per mezzo di soluzioni tecnologiche innovative.

L'Escalino rispecchia completamente questa filosofia: contiene infatti tutte le conoscenze ed esperienze da noi maturate negli anni nel settore dei propulsori per carrozzine e dei sistemi di movimentazione su scale. L'Escalino è un montascale sicuro e affidabile che presenta molti vantaggi:

- **Freno automatico di sicurezza**
- **Puntali per la movimentazione, anziché ruote, per avere maggiore sicurezza**
- **Supera scale strette e a chiocciola**
- **Utilizzabile anche come poltroncina da transito**
- **Riconducibile al Nomenclatore Tariffario**
- **Non provoca danni a spigoli o superfici dei gradini**
- **Maniglie e comando ergonomici**
- **Utilizzabile su tutti i tipi di scale**
- **Compatto, leggero e pieghevole**

escalino_i_03_2010



CE L'Escalino rispetta la direttiva 2007/47/EG relativa ai prodotti medici.

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso.



La ditta AAT Alber Antriebstechnik GmbH è membro del QVH ed ha ottenuto il riconoscimento di qualità secondo gli standard richiesti per le carrozzine per infermi.

Inoltre AAT è certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001:2000 e DIN EN ISO 13485:2003.

Dati tecnici

Portata max. consigliata	120 kg
Velocità	12 scalini/minuto
Autonomia con una carica	8 — 12 piani (in relazione al peso dell'utente)
Altezza scalino superabile	21 cm
Larghezza	51,8 45,8 cm (senza braccioli)
Profondità	72,3 cm
Altezza	135,7 cm
Accumulatori	2 x 12 V / 5 Ah (sigillati)
Motore	24 V
Peso gruppo motore	28,2 kg
Peso seggiolino	4,0 kg
Peso braccioli	1,5 kg
Peso complessivo	33,7 kg
Garanzia	2 anni



Ideen bewegen mehr

Medimec International Srl
Divisione tecnologie per la riabilitazione
Via Proventa, 52 · 48018 Faenza (RA)

Tel.: 0546-46870 · Fax: 0546-46467
medimec@medimec.it
www.medimec.it